




MyCore
8C Technology



نگاهی کلی به لوازم جانبی رکستون

Discover the smart choice.

REXTON

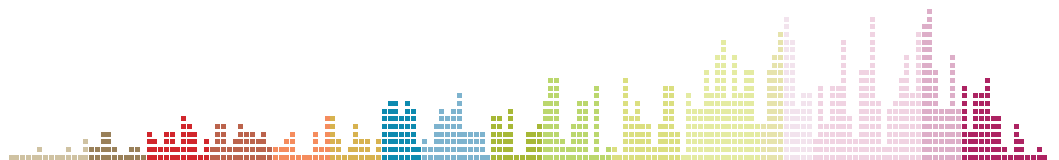

فهرست

۳

[SmartKey](#)

۴

[Smart Remote](#)

۶

[Smart Connect](#)

۹

[Smart Transmitter](#)

۱۱

[Smart Transmitter 2.4](#)

۱۳

[Smart Mic](#)

SmartKey

ریموت

استریمر



<https://www.aparat.com/v/oTIOB>

آشنایی کلی با دستگاه:

SmartKey یک ریموت کنترل بسیار کوچک است که به هر نوع جا کلیدی متصل می شود. یک راه حل ایده آل برای هر کسی است که می خواهد بدون احتیاج به ریموت کنترل بزرگ یا گوشی هوشمند به طور مناسب و راحت سمک را کنترل کند.



نحوه ی Pair کردن ریموت با سمک:

- ۱- ریموت را در حالت قفل قرار دهید.
- ۲- درب باتری سمک را باز و بسته کنید و آن را روی گوش قرار دهید.
- ۳- دکمه ی P ریموت را نگه دارید و همزمان آن را از حالت قفل خارج کنید. نشانگر روی دستگاه سبز رنگ خواهد شد.
- ۴- سپس دکمه ی P را رها کنید.
- ۵- دوباره دکمه ی P را فشار دهید تا چراغ روی ریموت سبز رنگ و ثابت شود.
- ۶- منتظر بمانید تا چراغ سبز رنگ ناپدید شود.
- ۶- اکنون ریموت را قفل نموده و سپس قفل را بلافاصله باز کنید.
- ۷- حالا ریموت و سمک آماده ی استفاده هستند.


نحوه ی استفاده از SmartKey:

- ابتدا از باز بودن ریموت کنترل اطمینان حاصل کنید.
 - برای تغییر برنامه از دکمه P استفاده کنید.
 - برای تغییر ولوم از دکمه های + و - استفاده نمایید.
 - برای خاموش کردن سمک های خود دکمه P و - را همزمان نگه دارید.
 - برای روشن کردن سمک دوباره دکمه P و - را نگه دارید.
- در مواقعی که نیاز به استفاده از ریموت نیست آن را قفل نمایید تا از تغییرات ناخواسته در تنظیمات سمک جلوگیری شود.

Smart Remote

■ ریموت

□ استریمر

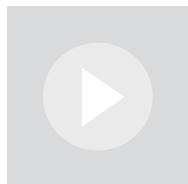

<https://www.aparat.com/v/oLcQu>

آشنایی کلی با دستگاه:

دستگاه Smart Remote یک ریموت کوچک با کلیدهای نسبتاً بزرگ و صفحه نمایش است که امکان استفاده راحت را برای کاربران ایجاد می‌کند. به کمک این ریموت کاربران می‌توانند به تنظیمات سمک خود دسترسی آسان داشته باشند.

* نکته قابل توجه در ارتباط با این دستگاه این است که امکان اتصال بلوتوثی از طریق Smart Remote وجود ندارد.



نحوه ی استفاده از Smart Remote:

برای تغییر ولوم از دکمه های + و - استفاده می شود .
برای تغییر برنامه از دکمه P استفاده می شود .


دکمه های جانبی دستگاه:

در نرم افزار Connexx می توانید دکمه های بالا و پایین کناری را برای حالت های برنامه های مختلف تعریف کنید .
با نگه داشتن دکمه های + و - ولوم به صورت همزمان ، وارد منو می شوید و می توانید بعضی تنظیمات عمومی دستگاه از قبیل ساعت و ... را تغییر دهید .

نحوه ی فعال کردن Smart Remote در نرم افزار Connexx:

- ۱- ابتدا Smart Remote را با استفاده از کابل مخصوص به کامپیوتر وصل کنید.
 - ۲- سپس وارد نرم افزار Connexx شده و اطلاعات و ادیوگرام بیمار را وارد کنید.
 - ۳- سپس سمک را کانکت کنید.
 - ۴- یک تنظیم اولیه یا First Fit روی سمک انجام دهید.
 - ۵- در نوار سمت چپ ، قسمت Configuration را انتخاب کنید.
 - ۶- گزینه ی Remote Controls را انتخاب کنید.
 - ۷- از میان آیکون های وسایل جانبی ، Smart Remote را انتخاب نمایید.
 - ۸- با کلیک روی ، آیکون Smart Remote را فعال و کانکت کنید.
 - ۹- سپس تنظیمات و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید.
 - ۱۰- به منظور انتقال تنظیمات انجام شده به Smart Remote ، روی آیتم  کلیک کنید.
- نکته:

دقت شود بعد از انتقال اطلاعات چنانچه تغییری در تنظیمات سمک انجام دهید ، مجدداً لازم است این اطلاعات به ریموت منتقل شود ،
برای این انتقال از آیکون  استفاده نمایید .

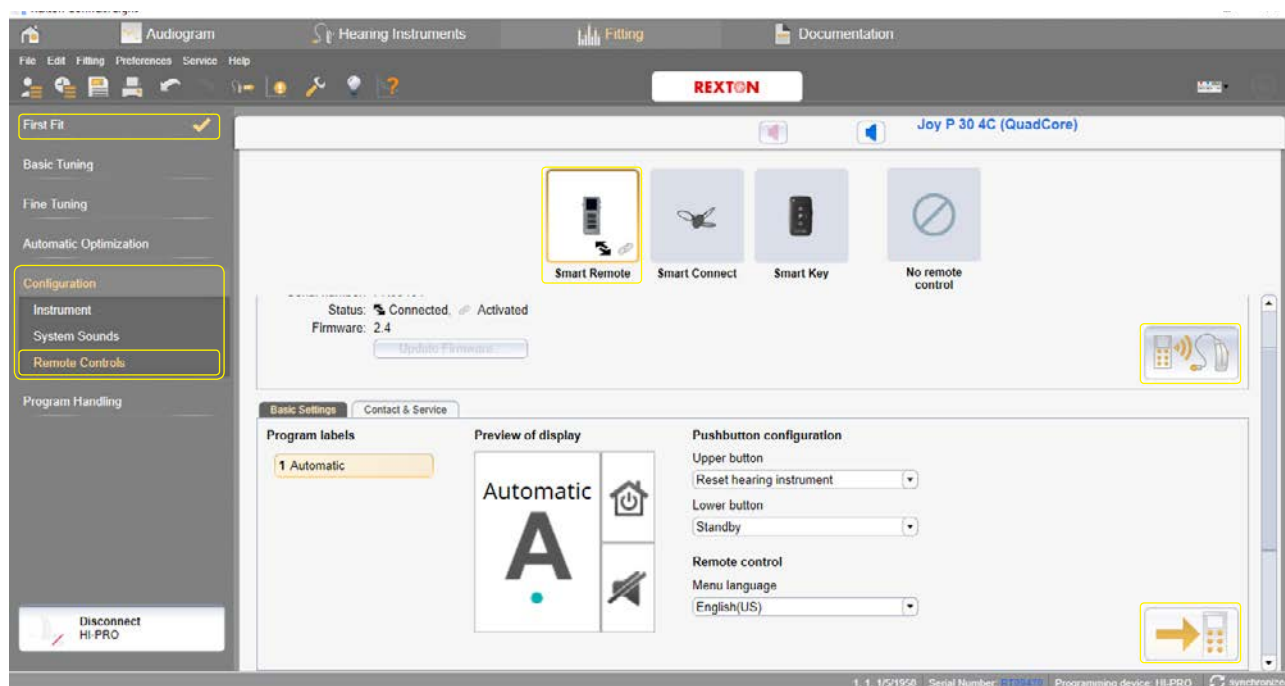

- ریموت
- استریمر

Smart Connect

آشنایی کلی با دستگاه:

این دستگاه یکی از وسایل جانبی پرکاربرد می باشد که دو نوع عملکرد دارد:

۱- ریموت کنترل (برای تغییر برنامه یا تنظیم ولوم صدا)

۲- استریمر (انتقال صدا از گوشی و سایر دستگاه های بلوتوث دار به سمعک ها)

همچنین این دستگاه از طریق اپلیکیشن Smart Connect نیز قابل کنترل می باشد.



<https://www.aparat.com/v/jMlvf>



۳ Neckloop (antenna)

۲ LED status indicators:

Bluetooth® Power Battery



۱ Multi-function button

۴ Built-in mic

۹ Volume up/ down

۸ Port for audio devices

۷ FM input

۶ Reset

۵ Micro-USB

۶ دکمه Reset

۷ ورودی برای گیرنده ی FM

۸ ورودی برای وسایل صوتی (ورودی ۳,۵ mm)

۹ دکمه های زیاد / کم صدا

۱ دکمه چند منظوره

۲ نمایشگر LED

۳ حلقه گردنی (آنتن)

۴ میکروفن داخلی

۵ ورودی USB برای شارژ شدن

شروع کار دستگاه:

ابتدا کابل مخصوص حلقه گردنی را به دستگاه متصل کنید و آن را دور گردن فرد قرار دهید. توجه کنید که سری های کابل کاملاً درست در جای مخصوص خود قرار بگیرند. دقت کنید که دو تا ورودی مخصوص سیم گردنی در دو سمت چراغ های LED دستگاه قرار دارند. (همانند شکل فوق، سیم گردنی را به دو تا ورودی وصل کنید.)

نحوه ی فعال کردن دستگاه Smart Connect در نرم افزار Connexx:

- ۱- ابتدا وارد نرم افزار Connexx شده و اطلاعات و ادیوگرام بیمار را وارد کنید.
- ۲- سپس سمک را کانکت کنید.
- ۳- یک تنظیم اولیه یا First Fit روی سمک انجام دهید.
- ۴- در نوار سمت چپ، قسمت Configuration را انتخاب کنید.
- ۵- گزینه ی Remote Controls را انتخاب کنید.
- ۶- از میان آیکون های وسایل جانبی، Smart Connect را انتخاب نمایید.
- ۷- با کلیک روی علامت  Smart Connect را فعال کنید.
- ۹- سپس در قسمت Program Handling برنامه ی Streaming Audio را انتخاب نمایید.

آماده سازی دستگاه برای Pair شدن با سمک:

دستگاه Smart Connect را دور گردن فرد قرار دهید و دکمه چند منظوره را چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود. قبل از اتصال Smart Connect به سمک از شارژ بودن کافی دستگاه اطمینان حاصل نمایید. (اگر نمایشگر باتری دستگاه نارنجی رنگ و چشمک زن باشد به معنی شارژ کم و نیاز به شارژ شدن دستگاه می باشد.) شارژ کامل دستگاه معمولاً ۲ ساعت زمان می برد. (بعد از شارژ کامل، چراغ LED سبز می شود.)

نحوه ی Pair کردن Smart Connect با سمک:

دستگاه Smart Connect را دور گردن فرد قرار دهید سپس دکمه چند منظوره را چند ثانیه نگه دارید تا نمایشگر روی دستگاه سبز و چشمک زن شود. (چنانچه همراه با چراغ سبزرنگ، چراغ آبی رنگ نیز چشمک بزند، دکمه ی چند منظوره را یکبار فشار دهید تا چراغ آبی رنگ خاموش شود.) سپس سمک ها را روی گوش فرد قرار دهید و درب باتری آنها را باز و بسته کنید. چند ثانیه منتظر بمانید تا دستگاه و سمک با هم Pair شوند. به محض Pair شدن، چراغ LED دستگاه به رنگ سبز، ثابت می ماند و سپس محو می شود.

نحوه ی Pair کردن Smart Connect با گوشی:

دکمه چندمنظوره و دکمه + ولوم را همزمان چند ثانیه نگه دارید. نمایشگر دستگاه آبی چشمک زن خواهد شد. بلوتوث گوشی را روشن کنید و بلوتوث دستگاه های دیگر را جستجو کنید سپس از میان دستگاه های یافت شده، Smart Connect را انتخاب کنید. به محض Pair شدن دستگاه با گوشی، چراغ آبی رنگ دستگاه ثابت، سپس محو می شود که این به معنی اتصال گوشی به Smart Connect است. توجه به ۲ نکته ضروری است:

- ۱- حداکثر فاصله بین گوشی و Smart Connect فاصله ی ۷ تا ۱۰ متری می باشد. در فواصل بیش از این میزان، ارتباط دستگاه با گوشی قطع شده و لازم است دوباره گوشی و دستگاه را Pair کنید.
- ۲- در مواقعی که شارژ دستگاه Smart Connect کافی نباشد در فواصل کمتر از ۷ متر ممکن است ارتباط دستگاه و گوشی قطع شود.

استفاده از Smart Connect به عنوان ریموت:

برای تغییر برنامه می‌توانید از دکمه چند منظوره استفاده کنید. (با تغییر برنامه نشانگر دستگاه سبز رنگ می‌شود و به سرعت محو می‌شود.)
برای تغییر ولوم (بلندی صدا) از دکمه های + و - استفاده نمایید.
برای بی صدا کردن (Mute) سمک ها، دکمه های + و - را همزمان نگه دارید.
برای Unmute کردن سمک ها نیز دوباره دکمه های + و - را همزمان نگه دارید.

برقراری تماس از طریق Smart Connect:

پاسخ دادن و خاتمه دادن تماس‌ها:

با دریافت تماس، صدای زنگ موبایل در سمک شنیده خواهد شد و نمایشگر دستگاه آبی چشمک زن خواهد شد. برای پاسخ به تماس، دکمه چند منظوره را فشار دهید. (در طول تماس، نمایشگر آبی ثابت خواهد ماند.) برای پایان تماس دوباره دکمه چند منظوره را فشار دهید.

انتقال تماس از Smart Connect به گوشی: دکمه ی چند منظوره را ۲ بار پشت سرهم فشار دهید.

رد کردن تماس با استفاده از Smart Connect: دکمه ی چند منظوره را بیش از ۳ ثانیه نگه دارید.

نحوه ی Pair کردن Smart Connect با Smart Transmitter:

دستگاه Smart Connect را با سمک Pair کنید.

دستگاه Smart Transmitter را برق وصل کنید و روشن نمایید و در نزدیکی Smart Connect قرار دهید.

سپس دکمه ی چند منظوره و دکمه های + و - ولوم را همزمان فشار دهید تا بلوتوث Smart Connect فعال شود.

نشانگر آبی چشمک زن به معنی آماده شدن دستگاه برای Pair شدن با Smart Connect است.

چندثانیه صبر کنید تا دو دستگاه با هم Pair شوند. (نشانگر آبی روی هر دو دستگاه ثابت خواهد شد.)

برای قطع ارتباط بین دو دستگاه یکبار دکمه چند منظوره Smart Connect را فشار دهید.

برای برقراری ارتباط بین دو دستگاه در دفعات بعدی، کافی است دکمه چند منظوره Smart Connect را دوباره به صورت متوالی فشار دهید.

نحوه ی دانلود کردن و تنظیمات Smart Connect App:

برای گوشی های دارای سیستم عامل اندروید، می‌توانید از Google Play Store برنامه ی Smart Connect را جستجو و دانلود کنید.

برای گوشی های دارای سیستم عامل IOS، از App Store برنامه را جستجو و دانلود کنید.

سپس برنامه را نصب کنید و پس از باز کردن برنامه، گزینه Being Setup را انتخاب کنید و طبق دستورالعمل های برنامه پیش بروید.

نحوه ی استفاده از Smart Connect App:

۱- Smart Connect App را باز کنید.

۲- از طریق این App به آسانی می‌توانید برنامه، تنظیمات ولوم و دایرکشنالیتی را تغییر دهید.

۳- می‌توانید میکروفن ها را از طریق علامت Mute بی صدا کنید.

۴- در Microphone-Pattern Adjustment می‌توانید تنظیمات دایرکشنالیتی میکروفن ها را تغییر دهید.

۵- از طریق Span می‌توانید تغییرات گسترده تری را در دایرکشنالیتی اعمال کنید.

۶- با استفاده از دکمه A در Microphone-Pattern adjustment می‌توانید به تنظیمات اولیه بازگردید.

۷- در قسمت Sound Balance تنظیمات اپلیکیشن، می‌توانید صدا را بم تر یا زیر تر نمایید.

۸- در قسمت تنظیمات می‌توانید از وضعیت شارژ سمک ها و دستگاه اطلاع پیدا کنید.

- ریموت
- استریمر

Smart Transmitter



<https://www.aparat.com/v/dYtgz>

آشنایی کلی با دستگاه:

دستگاه Smart Transmitter تلویزیون را به Smart Connect متصل می‌کند. از این طریق صدا به صورت بی‌سیم، مستقیماً به سمک جریان می‌یابد. * این دستگاه فقط با Smart Connect قابل استفاده می‌باشد و برای Pair شدن، ابتدا باید سمک را با Smart Connect، Pair کنید و سپس Smart Connect را با این دستگاه Pair نمایید.



نحوه‌ی فعال کردن Smart Transmitter در نرم افزار Connexx:

ابتدا در نرم افزار Connexx در کادر سمت چپ در قسمت Program Handling برنامه‌ی TV را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که برای اتصال سمک به Smart Connect نیز، باید برنامه‌ی Streaming Audio را نیز انتخاب کرده باشید.

نحوه‌ی Pair کردن Smart Transmitter با Smart Connect:

دستگاه Smart Connect را با سمک Pair کنید. دستگاه Smart Transmitter را برق وصل کنید و روشن نمایید و در نزدیکی Smart Connect قرار دهید. سپس دکمه‌ی چندمنظوره و دکمه‌های + و - ولوم Smart Connect را همزمان فشار دهید تا بلوتوث Smart Connect فعال شود. نشانگر آبی چشمک زن به معنی آماده شدن دستگاه برای Pair شدن با Smart Transmitter است. چندثانیه صبر کنید تا دو دستگاه با هم Pair شوند. (نشانگر آبی روی هر دو دستگاه ثابت خواهد شد). برای قطع ارتباط بین دو دستگاه، یکبار دکمه چند منظوره Smart Connect را فشار دهید. برای برقراری ارتباط بین دو دستگاه در دفعات بعدی، کافی است دکمه چند منظوره Smart Connect را دوبار به صورت متوالی فشار دهید.

نحوه‌ی اتصال Smart Transmitter به تلویزیون:

به دو صورت می‌توان دستگاه Smart Transmitter را به تلویزیون متصل کرد:
 ۱- با استفاده از کابل نوری: در این حالت یک سمت کابل نوری به (Toslink پشت دستگاه) و سمت دیگر آن به پورت مخصوص کابل نوری تلویزیون متصل می‌شود.

۲- با استفاده از کابل ۳٫۵ میلی متر: در این حالت یک سمت کابل به پورت Audio in پشت دستگاه و سمت دیگر آن به پورت کابل RCA (فیش قرمز و سفید) متصل می شود و کابل RCA به پورت Audio Output تلویزیون متصل می شود. اکنون دستگاه آماده فعالیت می باشد.

برای تغییرات جزئی بلندی صدا می توانید از دکمه های + و - Smart Connect و برای تغییرات بیشتر می توانید از دکمه های Smart Transmitter استفاده کنید.

برای قطع ارتباط تلویزیون و Smart Transmitter، دکمه ی چند منظوره Smart Connect را یکبار فشار دهید. برای برقراری ارتباط مجدد، دو بار دکمه چند منظوره ی Smart Connect را فشار دهید.

چراغ های LED روی دستگاه Smart Transmitter:

روی دستگاه Smart Transmitter سه چراغ LED مربوط به خاموش / روشن بودن دستگاه، بلوتوث و کابل نوری وجود دارد که رنگ هر کدام از آنها نمایانگر حالت خاصی می باشد.

چراغ LED پاور:

- سبز: آماده برقراری ارتباط
- خاکستری: خاموش

چراغ LED بلوتوث:

- آبی: برقراری ارتباط (عملکرد بلوتوث)
- خاکستری: خاموش

چراغ LED کابل نوری:

- چشمک زن نارنجی: کابل نوری متصل شده ولی انتقال صوتی برقرار نیست.
- نارنجی: برقراری ارتباط
- خاکستری: عدم برقراری ارتباط

- ریموت
- استریمر

Smart Transmitter 2.4

آشنایی کلی با دستگاه:


این دستگاه مستقیماً و بدون نیاز به هیچگونه واسطه‌ای با سمک‌های بلوتوث دار رکستون Pair می‌شود و صدای تلویزیون را مستقیماً از طریق بلوتوث به سمک‌های بلوتوث دار رکستون انتقال می‌دهد.



- ۱- نمایشگر TV
- ۲- نمایشگر پاور
- ۳- دکمه Setup
- ۴- پورت برق
- ۵- پورت RCA
- ۶- پورت ورودی / خروجی TOSLINK
- ۷- دکمه Mode

نحوه‌ی فعال کردن Smart Transmitter 2.4 در نرم افزار Connexx :

ابتدا در نرم افزار Connexx در کادر سمت چپ Configuration را انتخاب کنید سپس از زیر مجموعه آن، Instrument را انتخاب نمایید. اکنون در همان صفحه در بخش User Control، گزینه‌ی مربوط به Enable Rocker Switch را فعال نمایید سپس در قسمت Medium Press یا Short Press گزینه‌ی TV Stream را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که با انجام این مراحل، دیگر نیاز به تعیین برنامه خاصی برای Pair کردن دستگاه به سمک وجود ندارد.

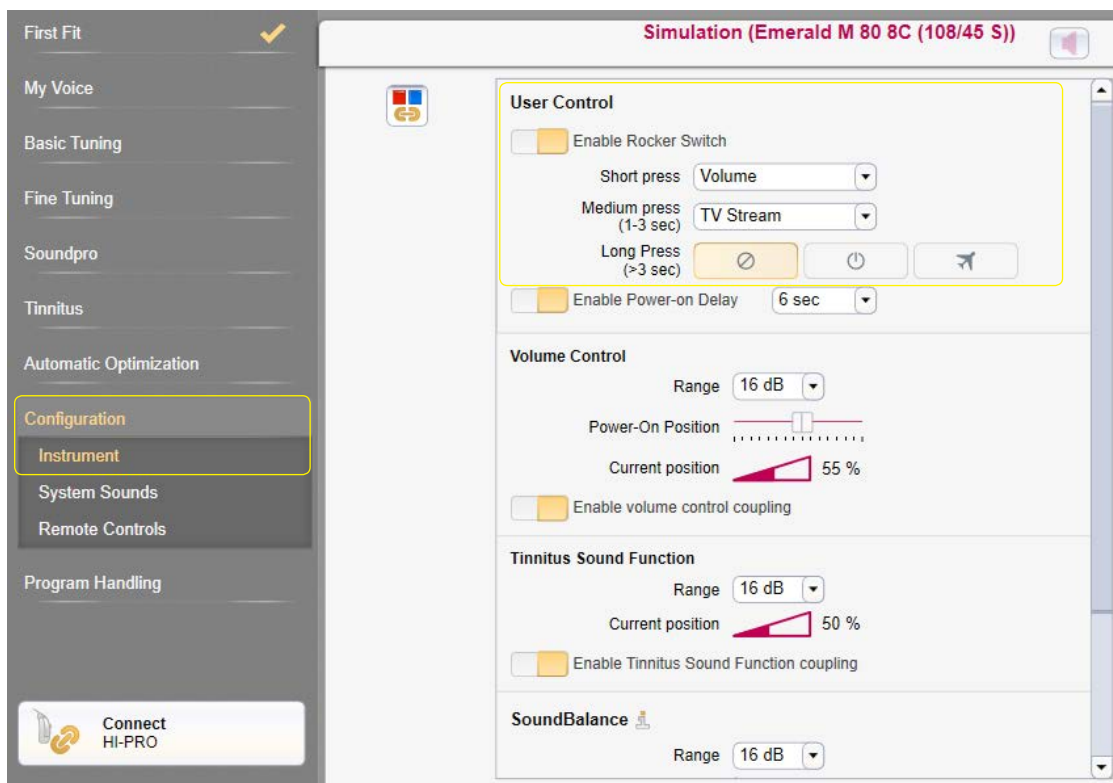

نحوه ی اتصال دستگاه به تلویزیون:

برای اتصال دستگاه به TV، از دو نوع کابل استفاده می شود:

۱- کابل RCA (فیش سفید و قرمز)

۲- کابل نوری

• در صورت استفاده از کابل RCA، یک سمت کابل را به دستگاه Smart Transmitter 2.4 و سمت دیگر آن را به خروجی RCA تلویزیون متصل نمایید.

• در صورت استفاده از کابل نوری، ابتدا دقت داشته باشید درپوش پلاستیکی روی کابل را بردارید سپس یک سمت کابل را به ورودی TOSLINK پشت دستگاه Smart Transmitter 2.4 و سمت دیگر آن را به خروجی TOSLINK تلویزیون متصل نمایید.

نحوه ی Pair کردن دستگاه با سمعک:

دستگاه Smart Transmitter 2.4 را به برق متصل نمایید، تا چراغ پاور روی دستگاه روشن شود، نمایشگر پاور دستگاه سفید رنگ می شود، سپس سمعک ها را روشن کنید و روی دستگاه یا کنار آن قرار دهید، در این حالت هردو نمایشگر TV و پاور دستگاه، ۳۰ ثانیه آبی می شود سپس رنگ آبی ناپدید می شود که این نمایانگر Pair شدن موفق دستگاه با سمعک می باشد.

اکنون برای شنیدن صدای تلویزیون، باید دقت داشته باشید که در نرم افزار کانکس، TV Stream را در Short Press انتخاب نموده اید یا Medium Press؟!

اگر short press را انتخاب کرده باشید کافی است یک بار دکمه ی + یا - Rocker Switch سمعک را فشار دهید و چنانچه Medium Press را انتخاب نموده ید دکمه ی + یا - Rocker Switch سمعک را به مدت ۱ تا ۳ ثانیه فشار دهید.



اطلاعات بیشتر:

برای تغییر ولوم صدای تلویزیون، باید از دکمه ی Rocker Switch سمعک یا اپلیکیشن Smart Direct استفاده کنید.

حالت های مختلف نمایشگر دستگاه:

نمایانگر	☐	⏻
روشن شدن دستگاه	---	☐
دستگاه با سمعک ها Pair نشده است.	■ ■	■ ■
هنگام Pair شدن دستگاه با سمعک ها، نمایشگرها به مدت ۳۰ ثانیه در این حالت قرار می گیرند.	■ ■	■ ■
دستگاه روشن است ولی هیچگونه سیگنال صوتی دریافت نکرده است.	---	■
دستگاه با کابل RCA به تلویزیون وصل شده و سیگنال صوتی دریافت می کند.	■ ■	■ ■
دستگاه از طریق کابل RCA سیگنال صوتی دریافت نمی کند یا ولوم صدا خیلی پایین است.	■ ■	■ ■
دستگاه از طریق کابل نوری، ارتباط درستی با TV برقرار کرده است علی رغم اینکه صدا پخش شود یا پخش نشود.	■ ■	■ ■
فرمت سیگنال صوتی پشتیبانی نمی شود.	■ ■	■ ■
خطا- با شرکت تماس بگیرید.	■ ■	■ ■

Smart Mic

□ ریموت

■ استریمر




<https://www.aparat.com/v/7tCNb>

آشنایی کلی با دستگاه:

دستگاه Smart Mic نقش استریمر بلوتوثی بین سمعک های بلوتوث دار 8C و وسایل صوتی بلوتوثی دارد و علاوه بر این دو عملکرد دیگر را نیز انجام می دهد:

۱- ریموت کنترل ۲- ریموت میکروفن

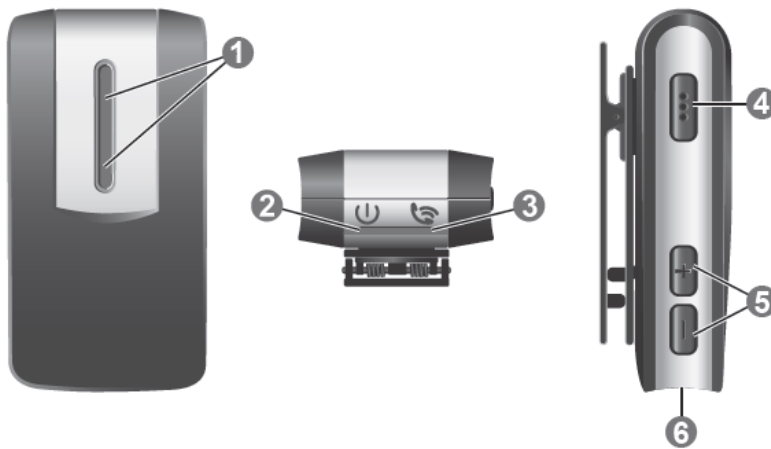

۱- میکروفن ها

۲- نشانگر خاموش / روشن بودن (U)

۳- نشانگر حالت دستگاه (Bluetooth icon)

۴- دکمه چند منظوره (Three dots icon)

۵- دکمه های + و -

۶- پورت USB برای شارژ کردن دستگاه

استفاده به عنوان ریموت کنترل:

در این حالت شما می توانید:

• با فشار دادن دکمه + و - ولوم صدا را تنظیم کنید.

• با نگه داشتن دکمه - به مدت ۳ ثانیه میکروفن های سمعک را Mute کنید و برای Unmute کردن کافی است یکبار دکمه - را فشار دهید.

• با نگه داشتن دکمه + به مدت تقریباً ۳ ثانیه برنامه سمعک را تغییر دهید.

استفاده به عنوان ریموت میکروفن:

عملکرد ریموت میکروفن به صورت خودکار شروع نمی شود بلکه شما باید دکمه ی چندمنظوره دستگاه را به مدت تقریباً ۳ ثانیه فشار دهید تا دستگاه در حالت ریموت میکروفن قرار بگیرد.

نحوه ی روشن کردن حالت ریموت میکروفن:

• دکمه چندمنظوره دستگاه را به مدت تقریباً ۳ ثانیه فشار دهید.

در این حالت، نمایشگر دستگاه به رنگ ارغوانی در می آید و بوق تایید در سمعک ها پخش می شود.

اکنون حالت ریموت میکروفن روشن است و گفتار فردی که دستگاه Smart Mic روی لباسش نصب شده است به صورت مستقیم به سمعک ها انتقال داده می شود.

نحوه ی خاموش کردن حالت ریموت میکروفن:

• دکمه چندمنظوره دستگاه را به مدت تقریباً ۳ ثانیه فشار دهید.

نحوه ی Pair کردن دستگاه با گوشی:

۱. دکمه چندمنظوره و + را همزمان به مدت تقریباً ۶ ثانیه نگه دارید تا نمایشگر دستگاه به رنگ آبی چشمک زن در بیاید.
۲. از لیست وسایل یافت شده در بلوتوث گوشی Smart Mic را انتخاب نمایید.
۳. چنانچه از شما رمزی درخواست شد، ۰۰۰۰ را وارد نمایید.
۴. به محض شدن Pair شدن دستگاه با گوشی، نمایشگر به رنگ آبی ثابت در می آید.

نحوه ی قرارگیری دستگاه روی لباس:

Smart Mic باید همانند شکل زیر روی لباس قرار بگیرد تا بهترین عملکرد را داشته باشد همچنین میکروفن دستگاه باید رو به روی دهان گوینده قرار گیرد و دستگاه نیز نباید توسط لباس پوشیده شود.



دریافت تماس تلفنی:

- هنگام دریافت تماس تلفنی، نمایشگر روی دستگاه به رنگ سبز چشمک می زند و صدای زنگ گوشی در سمعک ها شنیده خواهد شد.
- برای پاسخ دادن یا خاتمه دادن تماس تلفنی، دکمه ی چند منظوره دستگاه را فشار دهید یا می توانید با استفاده از گوشی، تماس تلفنی را پاسخ یا خاتمه دهید.
 - هنگام برقراری تماس، نمایشگر دستگاه به رنگ سبز ثابت در می آید.
 - برای رد تماس تلفنی، دکمه ی - دستگاه را به مدت تقریباً ۳ ثانیه فشار دهید.

برقراری تماس تلفنی:

هنگام برقراری تماس تلفنی با یک شخص، تماس به صورت خودکار به سمعک ها انتقال داده می شود و حین برقراری تماس، نمایشگر دستگاه به رنگ سبز ثابت در می آید.

توجه: این عملکرد هنگامی که از Smart Mic به عنوان ریموت میکروفن استفاده شود، قابل استفاده نمی باشد.

اطلاعات بیشتر:

Voice Dialing: هنگامی که گوشی با دستگاه Pair شده است، شما می توانید دکمه ی چندمنظوره ی دستگاه را دوبار فشار دهید تا Voice Dialing فعال شود.

گوش دادن به موسیقی:

هنگامی که گوشی با دستگاه ، Pair است ، با پخش موسیقی از گوشی ، شما می توانید موسیقی را از سمک ها بشنوید و در این حالت نمایشگر دستگاه به رنگ نارنجی ثابت در می آید.






شروع / خاتمه دادن موسیقی:

- از طریق گوشی و Music Player ، می توانید موسیقی را پخش یا خاتمه دهید.
- برای خاتمه دادن موسیقی ، دکمه ی چند منظوره ی دستگاه را یکبار فشار دهید.

نشانگر حالت های مختلف

زرد چشمک زن: جستجو برای سمک ها	
زرد ثابت: برقراری ارتباط با سمک ها	
آبی چشمک زن: StreamLine Mic در لیست وسایل یافت شده در بلوتوث گوشی ظاهر می گردد.	
آبی ثابت: برقراری ارتباط با گوشی	
سبز چشمک زن: دریافت تماس تلفنی	
سبز ثابت: برقراری تماس تلفنی	
نارنجی ثابت: پخش موسیقی	
ارغوانی: حالت ریموت میکروفن	
ارغوانی چشمک زن: ارتباط مجدد ریموت میکروفن	

نشانگر حالت های مختلف

قرمز ثابت: شارژ دستگاه کم است	
سبز چشمک زن: شارژ شدن دستگاه در حالتی که دستگاه روشن است	
سبز در حال محو شدن: کامل شدن شارژ دستگاه در حالتی که دستگاه روشن است	
سبز ثابت: دستگاه روشن است	
نارنجی چشمک زن: شارژ شدن دستگاه در حالتی که دستگاه خاموش است	
نارنجی ثابت: کامل شدن شارژ دستگاه در حالتی که دستگاه خاموش است	